


PEDI SOFT®

Zehenpolster
aus Silikon
1 Stück rechts

Art.-Nr. 107 100

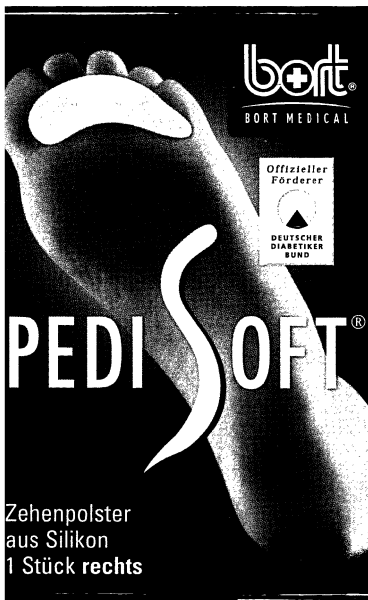

bort®
BORT MEDICAL

Offizieller
Förderer

DEUTSCHER
DIABETIKER
BUND

PEDI SOFT®

Zehenpolster
aus Silikon
1 Stück rechts

Vertrieb in der Schweiz:

Orthosan AG • CH-3042 Orschwaben • Tel. 0848 800 333

BORT GmbH • Postfach 1330 • D-71367 Weinstadt



Art.-Nr. 107 100 rechts

418-107100r/D-01/06 wmm



OT:

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080



Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 120

Funktion:

PEDISOFT® Zehenpolster ist ein druckentlastendes Silikon-Gel-Polster, das sich über die ganze Fußbreite erstreckt. Es sorgt für sofortige Schmerzlinderung im Zehenbereich und bietet Entlastung bei Fehlstellungen, indem es die Zehen sanft korrigiert.



Vorteile durch Silikon:

- ✓ dauerhaft und strapazierfähig
- ✓ sehr weich und glatt
- ✓ hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **einpuddern**.

PEDISOFT® Zehenpolster

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Mit der mittleren Zehe in die dafür vorgesehene Schlaufe gleiten, so dass das Polster sicher unter der Fußsohle liegt. Das weiche, glatte Material passt sich der Kontur des Zehes grundbereichs optimal an ohne zu verrutschen.