

PEDI SOFT®

Vorfußeinlage
aus Silikon
1 Paar

Art.-Nr. 107 120

Offizieller
Förderer



DEUTSCHER
DIABETIKER
BUND

bort®
BORT MEDICAL

PEDI SOFT®

Vorfußeinlage aus Silikon
1 Paar

Vertrieb in der Schweiz:

Orthosan AG * CH-3042 Orschwaben * Tel. 0848 800 333

BORT GmbH · Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt



Made in Germany

4B6-107120/D-07/07 wmm



Art.-Nr. 107 120

LOT:

IV III II I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080




Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 110

Funktion:

Die PEDISOFT® Vorfußeinlage deckt großflächig den beim Tragen hoher Schuhe sehr belasteten Vorfußbereich ab. Die Einlage dient der Druckentlastung, sorgt für sicheren und rutschfesten Halt und vermindert ein Brennen der Füße bei langem Stehen oder Laufen in hohen Schuhen.

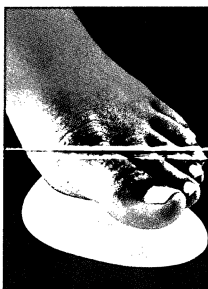

Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und Oberseite leicht **einpu- dern**.

PEDISOFT®

Vorfußeinlage

Anwendung:

Die Vorfußeinlage gemäß der Kennzeichnung R für rechts und L für links mit der strukturierten Seite nach oben in die Schuhe einlegen.

Für optimalem Halt im Schuh Unterseite der Einlage nicht einpu- dern!