



Elastische Handgelenkbandage

Indikationen: Bei Sehnenscheidenentzündungen, Zerrungen des Handgelenks und nach Abnahme von Gipsverbänden.

Kontraindikationen: Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Nur unter Belastung tragen, nicht während Ruhepausen, z. B. Schlaf.

Pflegehinweise: Mit Feinwaschmittel bis max. 30 Grad von Hand waschen. Nass bis auf ursprüngliche Länge in Form ziehen, an der Luft trocknen lassen. Direkte Hitze vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Produkt enthält Latex – kann allergene Reaktionen auslösen.

Bort GmbH
Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt