


PEDI SOFT®

Silikonring
2 Stück
small

Art.-Nr. 107 060

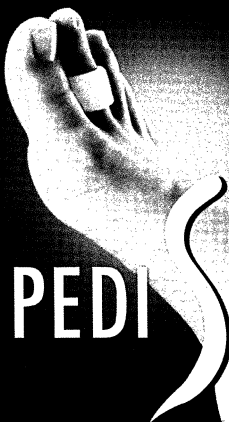

bort®
BORT MEDICAL

Offizieller
Förderer



DEUTSCHER
DIABETIKER
BUND

PEDI SOFT®

Silikonring
2 Stück
small

Vertrieb in der Schweiz:

Orthosan AG * CH-3042 Orschwaben * Tel. 0848 800 333

BORT GmbH • Postfach 1330 • D-71367 Weinstadt



Art.-Nr. 107 060 small

495-107060s/D-01/07 wfm



PZN 449 970 0

LOT:

Id IId IIId IVd le lle IIle IV

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080



Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 120

Funktion:

PEDISOFT® Silikonring ist aus weichem, elastischem Silikon und kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Speziell auch bei Hammerzehen bietet der Ring einen idealen Schutz vor Druckstellen.

Die elastische Ausführung bietet guten Schutz und sicheren Sitz.



Vorteile durch Silikon:

dauerhaft und strapazierfähig

sehr weich und glatt

hautfreundlich und hygienisch

dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

PEDISOFT®

Silikonring

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt auf Finger oder Zehen stecken. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen oder Reibung und Laufmaschen an Socken und Strümpfen zu verursachen.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **einpuddern**.