

PEDI SOFT®

TEXLINE



Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen. Speziell auch bei Hammerzehen.

Funktion:

Die Zehen-/Fingerkappe kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Bietet speziell auch bei Hammerzehen einen idealen Schutz vor Druckstellen.

Anwendung:

Die Zehen-/Fingerkappe ggf. auf die gewünschte Länge zuschneiden und über Zehen oder Finger ziehen.

Zur Vermeidung von Mazerationen sollte das Produkt für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abgenommen werden. Produkt vor Gebrauch mit beiliegendem Puder einpudern.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen!

Beim Auftreten von Hautirritationen oder Durchblutungsstörungen das Produkt sofort absetzen und ggf. einen Arzt konsultieren.



Vorteile:

- > dauerhaft, strapazierfähig, mehrfach verwendbar
- > sehr hygienisch und hautfreundlich
- > angenehmes Tragegefühl
- > Maschinenwaschbar bei 30°C
- > Polster verteilt den Druck optimal und schützt vor zusätzlichem Druck von außen
- > Kehrt nach dem Tragen dank Memory-Effekt sofort in die Ursprungsform zurück

UNSERE PEDISOFT®TEXLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



Art. Nr. 137 010



Art. Nr. 137 030



Art. Nr. 137 040



Art. Nr. 137 060



Art. Nr. 137 080



Art. Nr. 137 100